

F-201 NEW

Návod k použití



"FAZZINI" Vám děkuje za zakoupení tohoto přístroje. Před jeho používáním si prosím prostudujte tento návod k použití. Tato příručka obsahuje kompletní popis přístroje a návod pro správné použití. Dodržujte prosím všechny instrukce uvedené v této příručce.

Obsah této příručky může být změněn bez předchozího upozornění a to i technické parametry přístroje za účelem zlepšení parametrů přístroje. Je zakázáno měnit nebo kopírovat text této příručky bez předchozího souhlasu firmy "FAZZINI".

UPOZORNĚNÍ

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PROSÍM PROSTUDUJTE NÁVOD K POUŽITÍ

NENÍ DOVOLENO ZASAHOVAT DO PŘÍSTROJE, V PŘÍPADĚ PORUCHY JEJ SVĚŘTE AUTORIZOVANÉMU SERVISU

PŘÍSTROJ SE MUSÍ POUŽÍVAT DLE INSTRUKCÍ LÉKAŘE

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PROSÍM PROSTUDUJTE NÁVOD K POUŽITÍ
JINÉ POUŽITÍ NEŽ DLE INSTRUKCÍ V NÁVODU JE NEPŘÍPUSTNÉ
NÁVOD K POUŽITÍ SI USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD POZDĚJŠÍ POTŘEBY

PŘED ZAPNUTÍM PŘÍSTROJE DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ SE PŘESVĚDČTE, ZDA-LI NAPĚTÍ V SÍTI SOUHLASÍ S NAPĚTÍM UVEDENÝM NA PŘÍSTROJI.

PŘÍSTROJ NIKDY NEODPOJUJTE ZE SÍTĚ TAHÁNÍM ZA PŘÍVODNÍ ŠŤŮRU, VŽDY UCHOPTÉ ZÁSTRČKU.

DODRŽUJTE PEČLIVĚ NÍŽE UVEDENÉ ZÁSADY A DOPORUČENÍ.

PŘÍSTROJ SE NESMÍ OBSLUHOVAT MOKRÝMA RUKAMA.
ŠŤŮRA PŘÍSTROJE SE NESMÍ PŘIPOJOVAT DO ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY MOKRÝMA RUKAMA.

PŘÍSTROJ SE NESMÍ POUŽÍVAT POD SPRCHOU A VE VANĚ.

PŘÍSTROJ SE NESMÍ PONOŘOVAT DO VODY.

PŘÍSTROJ SE NESMÍ POUŽÍVAT V BLÍZKOSTI VÝBUŠNÝCH A HOŘLAVÝCH LÁTEK.
NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ NADMĚRNÝM TEPLOTÁM PŘÍMÉMU SLUNEČNÍMU SVĚTLU.
PŘÍSTROJ NESMÍ OBSLUHOVAT DĚTI BEZ DOZORU DOSPĚLÝCH.

PŘED ČIŠTĚNÍM PŘÍSTROJE SE UJISTĚTE, ŽE JE ODPOJEN OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ.
PŘÍSTROJ SE SMÍ POUŽÍVAT JEN PRO ÚČELY UVEDENÉ V TOMTO NÁVODU.

V PŘÍPADĚ POUŽITÍ PŘÍSTROJE K JINÝM ÚČELŮM VÝROBCE NEZARUČUJE DANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY A SPOLEHLIVOST.

KONTRAINDIKACE

PŘÍSTROJ SE MUSÍ POUŽÍVAT DLE INSTRUKCÍ LÉKAŘE
INHALOVANÁ LÁTKA MUSÍ BÝT PŘEDEPSÁNA LÉKAŘEM. PŘI UŽÍVÁNÍ JINÝCH LÉKŮ SE PORADTE S LÉKAŘEM.

ZPŮSOB POUŽITÍ PŘÍSTROJE

PŘÍSTROJ SE SMÍ POUŽÍVAT JEN V UZAVŘENÝCH MÍSTNOSTECH SE SCHVÁLENOU ELEKTRICKOU SÍTÍ.
PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE K ELEKTRICKÉ ZÁSUVCE SE PŘESVĚDČTE, ZDA-LI NAPĚTÍ NA ŠTÍTKU SOUHLASÍ S NAPĚTÍM V ELEKTRICKÉ SÍTI. OKOLNÍ TEPLOTA PŘI POUŽITÍ PŘÍSTROJE: 0° C AŽ 50° C.

FUNKCE

PÍSTOVÝ ELEKTROMAGNETICKÝ SYSTÉM INHALÁTORU VYTVÁŘÍ PROUD STLAČENÉHO VZDUCHU, KTERÝ JE VEDEN DO NEBULIZAČNÍ AMPULKY, KE ROZBÍJÍ MOLEKULÁRNÍ KOHEZNÍ SÍLY. TÍMTO ZPŮSOBEM JSOU MEDIKAMENTY V NEBULIZAČNÍ AMPULI TRANSFORMOVÁNY NA VVELMI JEMNU MLHOVINU, NEBO AEROSOL. PROUD AEROSOLU JE VDECHOVÁN PACIENTEM.

POPIS PŘÍSTROJE

PŘÍSTROJ SE SKLÁDÁ Z TĚCHTO ČÁSTÍ:

- A) SPOJOVACÍ HADIČKA PŘÍSTROJE S NEBULIZAČNÍ AMPULKOU
- B) SÍŤOVÝ VYPÍNAČ
- C) NEBULIZAČNÍ AMPULE, NÁUSTEK, KONCOVKA DO NOSU
- D) SÍŤOVÁ ŠŤŮRA
- E) MASKA PRO DOSPĚLÉ A DĚTI
- F) VZDUCHOVÝ FILTR (VKLÁDÁ SE V MÍSTĚ MODRÉHO PERFOROVANÉHO OVÁLU NA VRCHNÍ STRANĚ PŘÍSTROJE - PO JEHO VYTAŽENÍ)

NÁVOD K POUŽITÍ

- PŘIPOJTE SÍŤOVOU ŠŤŮRU K ELEKTRICKÉ SÍTI, PŘED PŘIPOJENÍM VŠAK ZKONTROLUJTE, ZDA-LI SOUHLASÍ NAPĚTÍ UVEDENÉ NA ŠTÍTKU PŘÍSTROJE S NAPĚTÍM V SÍTI
- NAPLNĚTE NEBULIZAČNÍ AMPULI PŘÍSLUŠNÝM MEDIKAMENTEM
- SPOJTE VÝSTUP STLAČENÉHO VZDUCHU Z PŘÍSTROJE NEBULIZAČNÍ AMPULÍ POMOCÍ SPOJOVACÍ HADIČKY (NĚKDY JE TŘEBA VĚTŠÍ SÍLY)
- PŘIPOJTE POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K NEBULIZAČNÍ AMPULI (MASKA, NÁUSTEK ČI KONCOVKA DO NOSU)
- ZAPNĚTE PŘÍSTROJ POMOCÍ SPÍNAČE ON/OFF A ZAHAJTE INHALACI PODLE DOPORUČENÍ LÉKAŘE
- DOBA CHODU: MAX. 30 MINUT

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

TENTO PŘÍSTROJ NEVYŽADUJE ŽÁDNOU ZVLÁŠTNÍ ÚDRŽBU. PO SKONČENÍ INHALACE PEČLIVĚ OČISTĚTE A OSUŠTE VŠECHNY DÍLY, KTERÉ BYLY POUŽITY PRO INHALACI. MŮŽETE POUŽÍT SLABÝ ČISTÍCÍ ROZTOK A VLHKÝ HADŘÍK. VÝMĚNA FILTRU JE ŽÁDOUCÍ PO ZMĚNĚ JEHO BARVY (MODRÝ PERFOROVANÝ OVÁL)

INDIKACE

AEROSOLOVÁ TERAPIE JE DOBŘE PROKÁZANÁ A ROZŠÍŘENÁ METODA LÉČBY RESPIRAČNÍCH POTÍŽÍ JAKO JSOU CHRONICKÉ BRONCHITIDY, BRONCHIÁLNÍ ASTMA, BRONCHOPNEUMONIE, PNEUMOPATIE, EMPHYSEM, SINUSITIDY, LARYNGITIDY, ATD.

TERAPIE MUSÍ BÝT SCHVÁLENA VAŠIM LÉKAŘEM , KTERÝ PŘEDEPÍŠE SPRÁVNOU LÁTKU NEBO LÉK A ZPŮSOB PROCEDURY

TERAPIE

NEJVĚTŠÍHO EFEKTU SE DOSAHUJE ROZDĚLENÍM TERAPIE DO 3 FÁZÍ A JEJICH OPAKOVÁNÍM

- INHALAČNÍ FÁZE: POMALÝ NÁDECH NA MAXIMÁLNÍ KAPACITU
- APNEICKÁ FÁZE: ZADRŽENÍ DECHU NA NĚKOLIK SEKUND
- EXHALAČNÍ FÁZE: ÚPLNÝ VÝDECH

F-201 NEW



TECHNICKÉ PARAMETRY

	u.m.	F-201
MAXIMÁLNÍ TLAK	bar	2,5
PRŮTOK VZDUCHU	l/min	5 to 8 LPM
OBJEM INHALACE	cc - min	2cc - 7min
VELIKOST ČÁSTIC	m	≤ 3 m
ROZMĚRY	mm	220x165x90 MM
NAPÁJENÍ	V / Hz	220V~ 50-60Hz
PŘÍKON	VA	<60W
POJISTKY	5mmx20mm	1x 2A - 250V
OBSAH LÉČIVA	ml	6 ml
HLUČNOST	Db	55 Db
VÁHA	Kg	1,5 Kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

05.5011/1 AMPULE
05.5012/1 MASKA
05.5015/1 KYSLÍKOVÁ HADIČKA 2,10M
05.5021/1 NÁUSTEK
05.5016/1 KONCOVKA DO NOSU

ZÁRUKA

VIZ. PŘILOŽENÝ ZÁRUČNÍ LIST

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ DLE DIREKTIVY 93/42 CEE

FAZZINI S.R.L. PROHLÁŠUJE, ŽE TENTO VÝROBEK JE VYROBEN SOULADU S PLATNOU EVROPSKOU LEGISLATIVOU

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ ČI DOTAZŮ PROSÍM KONTAKTUJTE:

FAZZINI S.R.L.
S.S. PADANA SUP, 317
200 90 VIMODRONE (MI) ITÁLIE
INFO@FAZZINI.IT

VÝROBCE:



Fazzini s.r.l.

S.S.PADANA SUPERIORE, 317 - 20090 VIMODRONE - ITALY
Fax : ++39.02.26515221 - e-mail : fazzini@fazzini.it - web : www.fazzini.it

DOVOZCE:

ITALMEDIC, S.R.O., VELKÉ DRÁHY 74E, 664 61 OPATOVICE, ČESKÁ REPUBLIKA
Tel: 547 422 600
E-mail: fazzini@fazzini.cz

