

Protokol Cavex Alginate Mixer II



Návod k použití:

1. Odměřte množství alginátového prášku a vody a vložte do míchací misky.

Doporučené množství na horní čelist



Doporučené množství na dolní čelist



2. Vždy nejprve zamíchejte! Usnadní se tím čištění a je to šetrnější k přístroji.

3. Nasadte víčko a dejte do Cavex Alginate Mixeru.

4. Zavřete Cavex Alginate Mixer a stiskněte start.

5. Alginát jedním pohybem z misky vyjměte a naneste ho na lžici.

Údržba/čištění mixéru Cavex Alginate Mixer:

1. V nádobce s vodou rozpusťte malé množství odstraňovače alginátu Cavex GreenClean.
2. V roztoku Cavex GreenClean navlhčete (ne namočte!) hadřík a míchací tyčinku a přístroj jednoduše vyčistěte.
3. Chraňte Cavex Alginate Mixer před znečištěním. Tak se do přístroje dostane méně zbytkové hmoty.

